


# Manual de Usuario Oxímetro de Pulso de Dedo

XM-101 Solo para uso de bienestar

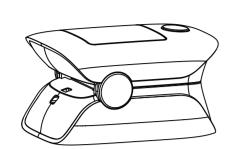

Documento No.: JDXM-0104-073 Version: Z

## Descripción general

El oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos al pasar por los Es transportado por todo el cuerpo como sangre arterial. Un oxímetro de pulso utiliza dos frecuencias de luz (roja e infrarroja) para determinar el porcentaje (%) de hemoglobina en la sangre que está

Este porcentaje se denomina saturación de oxígeno en sangre o SpO<sub>2</sub>. El oxímetro de pulso también mide y muestra la frecuencia del pulso al

mismo tiempo que registra el nivel de SpO<sub>2</sub>. El oxímetro es de uso exclusivo para bienestar.

Este dispositivo cumple con las normas IEC6061-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, ISO 80601-2-

61, IEC 62304, 47 FCC parte 15C, ANSI C63.27.

El principio del oxímetro es el siguiente:

saturada con oxígeno

# Principio de medición

El oxímetro de pulso funciona aplicando un lecho vascular arteriolar pulsátil. El sensor contiene una fuente de luz dual y un fotodetector.

- Una longitud de onda de luz es 660 nm (luz roja). - La otra es 905 nm (luz infrarroja roja).

La piel, hueso, tejidos y vasos normalmente absorben una cantidad

constante de luz a lo largo del tiempo. El foto detector en el sensor del dedo recopila y convierte la luz en una señal electrónica proporcional a la intensidad lumínica. El lecho arteriolar normalmente pulsa y absorbe distintas cantidades de luz

durante la sístole y la diástole, a medida que aumenta o disminuye el volumen de sangre. La proporción de luz absorbida en sístole y diástole se traduce en una medición de saturación de oxígeno, denominada SpO2.

### Diagrama del principio de operación

1. Tubo de emisión de luz roja e infrarroja 2. Tubo receptor de luz roja e infrarroja



### Aviso de seguridad

. Antes de usar, lea cuidadosamente el manual. 2. No use el oxímetro de pulso: -si es alérgico a productos de caucho. -si el dispositivo o su dedo están húmedos.

-durante una resonancia magnética (MRI) o tomografía computarizada -mientras se mide la presión arterial en el brazo.

-si tiene esmalte de uñas, dedos sucios, uñas postizas aplicadas. -en dedos con cambios anatómicos, edemas, cicatrices o quemaduras. -si el dedo es demasiado grande: más de 20 mm de ancho (0.787 pulgadas) o más de 15mm de grosor (0.59 pulgadas).

-si el dedo es demasiado pequeño: menos de 10 mm de ancho (0.393 pulgadas) o menos de 5 mm de grosor (0.197 pulgadas). -en menores de 18 años.

-si la luz ambiental cambia de manera fuerte. -cerca de gases inflamables o explosivos.

3. Colocar el dedo por largos periodos puede afectar la circulación sanguínea, lo que podría ser doloroso en pacientes con mala circulación. 4. Las mediciones son solo de referencia, no sustituyen una evaluación 5. Revise regularmente el oxímetro para asegurarse de que no tenga daños

visibles y que las baterías estén cargadas. Si está dañado, no lo use y contacte al servicio al cliente o al distribuidor autorizado. 6. No utilice partes adicionales que no estén recomendadas por el fabricante. 7. Bajo ninguna circunstancia intente abrir o reparar el dispositivo por su

cuenta. Si lo hace, perderá la garantía. Para reparaciones, contacte al servicio al cliente o distribuidor autorizado.

8. No mire directamente dentro de la carcasa durante la medición. La luz roja y la luz infrarroja invisible del oxímetro son dañinas para los ojos. 9. Este dispositivo no debe ser usado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisados por alguien responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para evitar que lo

10. Si la unidad estuvo almacenada a temperaturas bajo 0°C (32°F), déjela en un lugar cálido durante al menos dos horas antes de usarla. 11. Si la unidad estuvo almacenada a temperaturas sobre 40°C (104°F),

déjela en un lugar frío durante al menos dos horas antes de usarla. 12. Las pantallas del dispositivo no deben usarse para diagnosticar la fuerza del pulso o la circulación en el sitio de medición. Sirven únicamente para mostrar la variación visual del pulso y no para diagnósticos médicos. 13. El funcionamiento del oxímetro de pulso de dedo puede verse afectado por el uso de un bisturí eléctrico (ESU).

14. Siga las normativas locales para desechar o reciclar el dispositivo y sus

componentes, incluidas las baterías. 15. Este equipo cumple con IEC 60601-1-2 para compatibilidad electromagnética en entornos médicos y de sistemas. Sin embargo, equipos de radio o transmisión cercanos pueden afectar su desempeño. 16. Este equipo no está diseñado para uso durante transporte de pacientes

17. Cuando la señal no sea estable, la lectura puede ser inexacta. No la tome como referencia

fuera de instalaciones médicas

18. Equipos portátiles y móviles de comunicación RF pueden afectar el funcionamiento eléctrico del oxímetro. 19. Contraindicación: no está diseñado para monitoreo continuo.

20. ADVERTENCIA: el uso de este equipo junto o encima de otro puede producir un mal funcionamiento. Si es necesario, asegúrese de que todos los equipos funcionen correctamente. 21. ADVERTENCIA: los equipos portátiles de comunicación RF

por el fabricante. De lo contrario, podría degradarse el desempeño del

(incluyendo cables o antenas externas) deben mantenerse a más de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del oxímetro, incluidos los cables indicados

Pautas importantes de prueba 1. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede llevar a mediciones incorrectas o fallidas:

·Asegúrese de que la uña no tenga esmalte, uñas artificiales u otros ·Mantenga la uña lo suficientemente corta para que el dedo quede

cubierto por el clip del dispositivo. ·Mantenga la mano seca durante la medición. ·Evite fuentes de luz intensa cerca del oxímetro, como lámparas

fluorescentes o luz solar directa. ·Proteja el oxímetro contra polvo, golpes, humedad o materiales

·Evite el movimiento del paciente durante la medición. ·No coloque el sensor en una extremidad que tenga un manguito de presión arterial, catéter arterial o vía intravenosa.

2. Las siguientes situaciones pueden causar mediciones inexactas: ·Mala circulación: pacientes con paro cardíaco o en shock pueden tene lecturas inexactas. Los pacientes con arritmias cardíacas (ej. taquicardias supraventriculares, ectopías ventriculares) pueden experimentar disminuciones en la saturación de oxígeno medida.

·Grosor de la piel: tamaños de dedo inadecuados pueden producir errores en la medición ·Temperatura de la piel: una temperatura baja en la piel puede generar

lecturas incorrectas. Pacientes con presión baja o anemia pueden presentar esta condición. 'Uso de tabaco: puede causar dishemoglobinas que afectan la lectura. ·Esmalte de uñas: puede interferir con la medición y alterar la

·Envenenamiento por CO o nitritos: puede causar dishemoglobinas que afectan la precisión ·Baja perfusión: cuando la saturación de oxígeno es inferior al 70%, la precisión no está definida. Si se observan claramente mediciones inexactas, repita la prueba y

### consulte a su médico si es necesario. Indicaciones de uso


Ilustración de la unidad

El oxímetro de pulso de dedo es un dispositivo portátil, no invasivo, de chequeo puntual, que mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y la frecuencia del pulso en adultos en el hogar.

# Contenido

- 1 Oxímetro de pulso Go Safe 1 Oxímetro de pulso Go Safe
- 1 Manual del usuario
- 1 Correa de sujeción 1 Bolsa de almacenamiento

## Unidad de Monitoreo

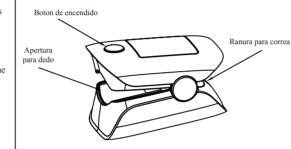

Pantalla




### Características

- 1. Fácil de operar y conveniente de llevar. 2. Tamaño pequeño, peso ligero y bajo consumo de energía.
- 3. Muestra SpO<sub>2</sub>, PR, barra de pulso y forma de onda.
- 4. Nivel de brillo ajustable del 1 al 5. 5. 5 modos de pantalla.
- 6. Advertencia de bajo voltaje indicada en la ventana visual cuando la batería está demasiado baja y la operación normal del oxímetro
- puede verse afectada. 7. Cuando muestra "Dedo fuera", el oxímetro se apagará
- automáticamente en 10 segundos. 8. Alarma sonora (beep).

9. Función Bluetooth.

# Operación de la unidad

Instalación de Baterías Siga la flecha para desbloquear la tapa de la batería. Instale 2 baterías AAA alcalinas nuevas según la polaridad indicada, coloque la tapa

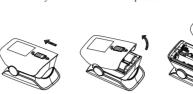

nuevamente y ciérrela en dirección opuesta a la flecha.

baterías usadas.

1. Asegúrese de seguir la polaridad correcta al instalar las baterías. Una polaridad invertida puede dañar el dispositivo

2. Use únicamente el tamaño y tipo de baterías especificadas. 3. No mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías viejas con nuevas.

Reemplace siempre las baterías en pares. 4. Cambie las baterías a tiempo cuando la luz de bajo voltaje se encienda. 5. Si las baterías están agotadas o el dispositivo no se utilizará durante un

largo período, retírelas para evitar daños o fugas. 6. No intente recargar baterías que no estén diseñadas para recargarse;

podrían sobrecalentarse v romperse. 7. No arroje baterías al fuego; podrían explotar o fugarse.

8. Mantenga las baterías fuera del alcance de niños y mascotas. Si un niño o mascota ingiere una batería, busque asistencia médica de inmediato. 9. Siga siempre las leyes locales de su gobierno para la disposición de

### Colocación de la correa de sujeción



# Configuración del sistema

Con el dispositivo apagado, presione el botón de encendido por aproximadamente 2 segundos para entrar al menú de configuración del Opciones de configuración disponibles:

Beep: Encendido/apagado de la alarma

Language: Cambiar el idioma de visualización Default: Restaurar los parámetros a los valore de fábrica. Exit: Salir de la pantalla de configuración.

Operación: -Presión larga: entra al valor específico de la -Presión corta: cambia entre los diferentes

80- 90 | 90- 100

79

93

0.62

1.11% | 1.19% | 1.13%

PRECAUCIÓN: -Asegúrese de que el tamaño de su dedo sea apropiado (ancho del dedo: 10–20 mm / 0.393– 0.787 pulgadas, grosor: 5–15 mm / 0.197–0.59

-Este dispositivo no debe usarse en entornos de radiación fuerte. Solo puede usarse después de enlazarse correctamente.

-El oxímetro de pulso no debe usarse cerca ni apilado con otros equipos para evitar interferencias. -Al colocar los dedos, asegúrese de que cubran completamente la ventana de transmisión LED en el compartimiento del clip.

1. Como se muestra en la figura, apriete el clip del oxímetro, inserte completamente el dedo en el compartimiento y luego suelte el clip. 2. Presione el botón de encendido una vez en el panel frontal para encender el oxímetro.

3. Mantenga las manos quietas durante la lectura. No mueva el dedo durante la prueba. Se recomienda que el cuerpo permanezca inmóvil mientras se toma la lectura.

4. Lea los datos en la pantalla de visualización. 5. Para seleccionar el brillo deseado, mantenga presionado el botón de encendido durante la operación hasta que cambie el nivel de brillo. 6. Para elegir entre los diferentes formatos de pantalla, presione el botón brevemente durante la operación. 7. Si retira el oxímetro de su dedo, este se apagará automáticamente





## Uso con comunicación Bluetooth

a) Descargue e instale la aplicación "JovTech" desde la tienda de aplicaciones de su smartphon Recomendado: Google Play Store para Android, App Store para iOS. b) Abra la aplicación en su teléfono. Si es necesario, active el Bluetooth en la configuración de su teléfono

c) Cree una nueva cuenta de usuario en la aplicación o use un nombre de usuario y contraseña existentes para iniciar sesión.

d) Atención: Primero, encienda el oxímetro y luego seleccione "no conectado" en la aplicación Cuando la aplicación detecte el Bluetooth del oxímetro, el nombre del

dispositivo aparecerá en la pantalla. En ese momento, haga clic en "Vincular este dispositivo" en la aplicación. Cuando aparezca "conectado" en la aplicación, la conexión será exitosa.

Nota: Para garantizar la conexión entre el teléfono designado y el oxímetro designado, es necesario que todos los demás oxímetros estén apagados. e) Una vez que su oxímetro esté conectado con éxito al smartphone, los

datos se transferirán automáticamente en tiempo real a la aplicación sin demoras. Nota: El monitor requiere un smartphone con Android 5.0 o superior o iOS 9.0 o superior.

Introducción a la aplicación

vincularse con un nuevo oxímetro.



### Como se muestra en la figura, este es el ícono de la aplicación. La interfaz de la aplicación puede mostrar

Nivel de oxígeno en sangre (SpO2). Valor de pulso.

Onda de pulso.

Datos históricos en forma de curva. Cuando el usuario retira el dedo del oxímetro, la aplicación registra los

La página de inicio de la aplicación muestra los 3 últimos datos históricos, y la sección de "Curva" muestra gráficos con todos los datos históricos de cualquier fecha pasada.

envío inverso). Una vez que la conexión Bluetooth es exitosa, la aplicación recibe datos automáticamente, pero la conexión solo se puede desconectar cuando el oxímetro se apaga o cuando el Bluetooth del móvil está apagado. Solo cuando se desconecta el dispositivo original, la aplicación puede

### Limpieza y mantenimiento

1. Use alcohol médico para limpiar la silicona que toca el dedo en el interior del oxímetro con un paño suave humedecido con alcohol isopropílico al 70%. También limpie el dedo antes y después de cada

2. No vierta ni rocíe líquidos dentro del oxímetro y no permita que ningún líquido entre en las aberturas del dispositivo. Deje que el oxímetro se seque completamente antes de reutilizarlo. 3. El oxímetro de pulso de dedo no requiere calibración ni mantenimiento

de rutina aparte del reemplazo de baterías. 4. La vida útil del dispositivo es de 3 años cuando se usa para 10 mediciones diarias, con una duración de 10 minutos cada una. Detenga su uso y contacte al servicio técnico local si ocurre alguno de los siguientes

-Aparece un error en los problemas y soluciones mostrados en la pantalla -El oxímetro no enciende en ningún caso y no se debe a las baterías. -Hay una grieta en el oxímetro o daño en la pantalla que impide leer los resultados; el resorte está inválido o la tecla no responde o está inutilizable.

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

### Procedimiento de limpieza:

1) Coloque el oxímetro sobre una superficie limpia y limpie toda la superficie y las almohadillas superior e inferior del dedo 3 veces con un paño suave humedecido en isopropanol al 70%. 2) Espere 1 minuto para que el oxímetro se segue completamente.

Procedimiento de desinfección: 3) Sumerja un paño suave en isopropanol al 70% y sujete el oxímetro por las almohadillas de dedo durante al menos 3 minutos. 4) Retire el paño, espere 1 minuto para que el oxímetro se seque

PRECAUCIÓN: Nunca use EtO ni formaldehído para la desinfección.

1. El dispositivo se suministra como no estéril; por favor, límpielo y desinféctelo según las instrucciones antes de cada uso.

### Guía de solución de problemas

ı				
	Problema	Causa	Solución	
		Baterías agotadas	Reemplazar las baterías	
	Monitor no enciende	Baterías mal colocadas	Reinsertar las baterías correctamente. Si después de hacerlo aún no aparece valores, contactar servicio técnico	
	Mediciones erráticas	Mala circulación en el dedo de medición	Seguir las pautas de uso importantes	
		El dedo, mano o cuerpo se mueven	Mantener el dedo, la man y el cuerpo quietos duran la medición	
		Arritmia cardíaca	Buscar atención médica	
		El dedo no está insertado correctamente	Volver a insertar el dedo	
	Las mediciones no se muestran correctamente	El valor de SpO <sub>2</sub> del paciente es demasiado bajo para medirse	Puede haber iluminación excesiva; intente nuevamente varias veces. Si el problema persiste, acuda a un hospital para un diagnóstico preciso	

### El oxímetro podría no esta colocado correctamente con Mueva el oxímetro a 5–10 el dispositivo inteligente o m del dispositivo la transmisión de datos es inteligente e intente demasiado débil desde el Fallo en la No se transmiten lo con éxito el dispositivo dispositivos una vez más inteligente. Revise la aplicación e La app no inició la intente enviar los datos nuevamente.

# Diagrama del principio de operación

Pantalla OLED de 0.96"

Modelo

	Rango de Visualización	0%~ 100%		
	Rango de medición	70%~ 100%		
SpO2	Precisión	70%~ 100 % ±2% 0%~ 69% sin definición		
	Resolución	1%		
	Rango de Visualización	0~240bpm		
	Rango de medición	30~ 240bpm		
Frecuencia de Pulso	Precisión	30~100bpm,±2bpm; 101~240bpm,±2%		
	Resolución	1bpm		
Fuente de Energía	Baterias 2x1.5vAAA			
Consumo de Energía	<6	0mA		
Peso	Aprox.5	54g (0.12 lb)		
Dimensiones	Aprox.60.2mi (2.37 *	Aprox.60.2mm*35mm*35.5mm (2.37 * 1.38 * 1.4)		
	Temperatura	5°C~40°C (41°F~104°F)		
Entorno de operación	Humedad	15%~ 93%RH		
	Presión	700hPa~1060hPa		
	Temperatura	-20°C~55°C (-4°F~131°F)		
Entorno de almacenamiento	Humedad	15%~ 93%RH		
	Presión	700hPa~1060hPa		
Clasificación de protección de ingreso	IP22			
Clasificación	Alimentado interr	amente Tipo BF		
	Rango de Frecuencia	2.4GHz(2400~2483.5MHz)		
	Modulación	GFSK		
	Versión BT	5.0 BR/EDR/BLE		
	Potencia transmitida	<20dBm @ temperatura ambiente		
Comunicación Bluetooth	Sensibilidad RF	-96dBm @ modo BLE		
	Voltaje de suministro	2V - 3.6V		
	Consumo de corriente	<6 mA (modo BLE) <20mA (modo BR/EDR) <6 μA (modo suspensión)		
Especificaciones de la sonda LED	Longitud de onda	Consumo de energía		
Rojo(RED)	Aprox. 660nm	Potencia 3.2mW		
Infrarrojo(IR)	Aprox.905nm	Potencia 2.4mW		

Periodo de actualización de datos

Menos de 12 Segundos

oxímetro de pulso.

El probador funcional no debe usarse para evaluar la exactitud del oxímetro. Los métodos de prueba utilizados para establecer la precisión de SpO<sub>2</sub> son clínicos. El oxímetro se usa para medir los niveles de saturación de oxígeno en la hemoglobina arterial y estos niveles deben compararse con los niveles determinados por una muestra de sangre

arterial con un CO-oxímetro. . ISO 80601-2-61: equipo médico eléctrico – parte 2-61: requisitos particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial del equipo

& A2:2010/(R)2012 (Cons.Text)(Incl.AMD2:2021): equipo médico eléctrico - parte 1: requisitos generales para seguridad básica y desempeño 3. IEC 60601-1-2: equipo médico eléctrico – parte 1-2: requisitos

generales para seguridad básica y desempeño esencial – estándar colateral:

2. ANSI AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 & A1:2012,C1:2009/(R)2012

4. IEC 60601-1-11: equipo médico eléctrico – parte 1-11: requisitos generales para seguridad básica y desempeño esencial – estándar colateral: requisitos para equipos médicos y sistemas eléctricos médicos usados en el

perturbaciones electromagnéticas - requisitos y pruebas (General II

entorno del hogar.

Eliminación correcta de este producto Este ícono 🕱 que aparece en el producto indica que no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo de manera responsable. Al desechar este tipo de producto, contacte al minorista donde fue adquirido o a su oficina local de gobierno para obtener detalles sobre cómo desecharlo en un centro de reciclaje seguro.

Los usuarios comerciales deben contactar a su proveedor y revisar los

términos y condiciones de la compra. Este producto no debe mezclarse con

Este producto está libre de materiales peligrosos.

otros residuos comerciales al momento de su disposición.

Explicación de iconos						
Simbolo Definición Simbolo Defi		Definición	Simbolo	Definición		
<u>Z</u>	Conformidad con la Directiva WEEE	w	Información del fabricante	((c;))	Radiación electromagnétic no ionizante	
$\triangle$	Precaución	M	Fecha de Fabricación	SpO 2%	Saturación de oxígeno	
IP22	Protegido contra agua goteando	LOT	Código de lote	PR bpm	Frecuencia del pulso (BPM)	
===	Corriente directa	X	Límite de temperatura	*	Bluetooth	
À	Parte aplicada tipo BF	<u></u>	Límite de humedad	×	Alarma desactivada	
<b>(3)</b>	Siga las instrucciones de uso	9	Límite de presión atmosférica	<b>4</b> )	Alarma activada	
SN	Número de serie	ů	Indicación de batería baja	Ø	Consejos desactivados	
MR	Inseguro para resonancia magnética	<b>※</b>	Inhibición de alarma	Ç	Consejos activados	

recaución: Los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos

. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la

nterferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Nota: El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales

de exposición a RF. Puede usarse en condiciones portátiles sin restricción. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo Se recomienda al usuario corregir la interferencia tomando una o más de las

· Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor · Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para

Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

Reorientar o reubicar la antena receptora.

siguientes medidas:

obtener ayuda.

Garantía El oxímetro de pulso de dedo está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. Si el oxímetro no funciona correctamente debido a omponentes defectuosos o mano de obra deficiente, lo repararemos o

reemplazaremos sin costo. La garantía no cubre daños por mal manejo.

Información de contacto:

**Instrucciones adicionales** 

movimiento, incluvendo

3. Uso durante ejercicio y perfusión débil:

### info@gosafeworld.com Precisión de la sonda del oxímetro

Items	Descripciones		
Precisión clínica de SpO2 (Brazos) (70-80%)	± 2%		
Precisión clínica de SpO2 (Brazos) (80-90%)	± 2%		
Precisión clínica de SpO2 (Brazos) (90-100%)	± 2%		
Esterilización	No estéril		
Configuraciones predeterminadas	Ninguna		
Reutilización	Desinfectar para uso repetido		

. Frecuencia de inspección del sitio de aplicación para integridad de Antes de insertar el dedo en la sonda del oxímetro, se debe revisar visualmente la piel para asegurar que esté libre de lesiones u otras

2. Frecuencia de reemplazo del sensor: No es necesario reemplazar el sensor de oxígeno dentro de la vida útil del

(1) NO mueva su dedo, brazo o cuerpo durante la medición. El

hablar, toser o estornudar durante la medición, puede afectar la precisión de los resultados. (2) La lectura NO del condiciones de baja perfusión durante la medición.

### El sensor con monitor específico ha sido validado y probado para cumplir con ISO 80601-2- 61:2017+COR1:2018 y con la guía FDA – Oxímetros de Pulso: Presentación de Notificación Premarket [510(k)].

En los ensayos clínicos, los datos se obtuvieron de un estudio controlado de hipoxia inducida en voluntarios adultos sanos. Un total de 12 sujetos, incluyendo 5 muieres y 7 hombres, fueron reclutados de voluntarios sanos no fumadores entre 22 y 45 años. En la evaluación clínica, se validaron

La precisión del oxímetro de pulso fue probada en doce voluntarios sanos de entre 22 y 45 años, con tonos de piel que iban de Fitzpatrick 3 a 5. Dos sujetos tenían piel oscura con valor Fitzpatrick 5. Las siguientes tablas

116

0.65

288 pares de datos de los 12 adultos para el modelo XM-101.

### muestran el sesgo y la precisión por género y tono de piel. Tabla 1 Precisión para todos los sujetos (12 en total)

Rango SaO2 (%) 70- 100(General) 70- 80

288

1.14%

#de pares de dato

Sesgo

Armas

Tabla 2 Precisión para sujetos con piel oscura (2 sujetos, Fitzpatrick 5)					
Rango SaO2 (%) 70- 100(General)		70- 80	80- 90	90- 100	
#de pares de datos	48	18	19	11	
Sesgo	0.65	0.68	0.56	0.65	
Armas	1.12%	1.15%	1.12%	1.12%	
Tabla 3 Precisión para sujetos con piel clara (10 sujetos, Fitzpatrick 3–4)					
Rango SaO2 (%)	70- 100(General)	70- 80	80- 90	90- 100	
#de pares de datos	240	98	74	68	
Sesgo	0.64	0.65	0.63	0.64	
Armas	1.15%	1.08%	1.20%	1.16%	
Tabla 4 Precisión para sujetos femeninos (5 sujetos)					
Rango SaO2 (%)	70- 100(General)	70- 80	80- 90	90- 100	
#de pares de datos	120	51	34	35	
Sesgo	0.64	0.69	0.54	0.64	
Armas	1.14%	1.14%	1.20%	1.12%	
Tabla 5 Precisión para sujetos masculinos (7 sujetos)					
Rango SaO2 (%)	70- 100(General)	70- 80	80- 90	90- 100	
#de pares de datos	168	65	59	44	
Sesgo	0.65	0.63	0.66	0.67	
Armas 1.14%		1.11%	1.18%	1.13%	

la desviación promedio de los datos SpO2-SaO2 para cada sujeto y para todos en conjunto se calculó mediante un modelo de regresión lineal.

# Los resultados se muestran en la siguiente tabla

Número de sujeto	Resultados promedio de desviación (%
S001	0.82
S002	0.93
S003	0.71
S004	1.13
S005	0.96
S006	0.92
S007	1.00
S008	0.74
S009	0.92
S010	0.86

Se obtuvieron un total de 288 conjuntos de datos en este ensayo clínico, y

Gráfico Bland-Altman de las mediciones de SaO2 y SpO2 (gráfico de desviación

# Gráficos de regresión para todos los sujetos

Declaración de desempeño esencial a) Cuando el oxímetro se coloca en el dedo del paciente o en un dedo

simulado, los valores de SpO2 y PR pueden mostrarse normalmente b) Precisión de las mediciones:

### Precisión clínica de SpO2 (Arms): en el rango del 70%–100%, ±2%. Precisión clínica de la frecuencia del pulso (Arms): en el rango de 30-100 bpm, ±2 bpm; 101–240 bpm, ±2%.

Información sobre compatibilidad electromagnética El dispositivo cumple con los requisitos EMC del estándar internacional IEC 60601-1-2. Los requisitos se cumplen bajo las condiciones descritas en la tabla a continuación. El dispositivo es un producto médico eléctrico y está sujeto a medidas de precaución especiales con respecto a EMC, las cuales deben publicarse en las instrucciones de uso Los equipos de comunicación HF portátiles y móviles pueden afectar el dispositivo. El uso del dispositivo en conjunto con accesorios no aprobados puede afectar negativamente el dispositivo y alterar la compatibilidad electromagnética. El dispositivo

Declaración del fabricante y guía — Emisión electromagnética

no debe usarse directamente junto ni entre otros equipos eléctricos

Emisiones de prueba Cumplimiento Entorno electromagnético – guía			
Emisiones de prueba	Cumpilmiento	Entorno electromagnetico – guia	
Emisiones conducidas CISPR 11	No aplicable		
Emisiones radiadas CISPR 11	Grupo 1 Clase B	El dispositivo es apto para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro de energia de baja tensión que abastece a los edificios utilizados	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplicable	con fines domésticos.	

30 A/m, 50/60Hz

Declaración del fabricante y guía - Inmunidad electromagnética

IEC 61000-4-8

eneral.		El dispositivo está destinado p	ara uso an al antorno alastrom	agnático acpacificado a
omedio de desviación (%)	continuaci			de que se utilice en dicho entorno.
0.82	Prueba de inmunidad	Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético – guía
0.93	Tracoa de minamana	IEC 60601 ± 8 kV Contacto	± 8 kV Contacto	Los pisos deben ser de madera, concreto o
0.71	Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2		± 8 kV Contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	cerámica. Si los pisos son de material sintético, la humedad relativa debe ser
1.13	(155) 150 01000-12	12 KV, 14 KV, 18 KV, 113 KV Aire	Aire	mayor al 30%.
0.96	Transiente eléctrico			
0.92	rápido / ráfaga	±2 kV para líneas de suministro de energía, ±1 kV para líneas de	N/A	N/A
1.00	IEC 61000-4-4	entrada/salida		
0.74				
0.92	Sobretensión	±0.8 kV.		
0.86	IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial	N/A	N/A
1.01				
0.72				
+1.96 SD 2.2	Caídas de voltaje, interrupciones cortas y variaciones de voltaje en las lineas de suministro de energía IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % caida en UT), 1 ciclo <70 % UT (>30 % caida en UT), 25/30 ciclos	N/A	La potencia debe ser la típica de un entorno comercial u hospitalario.
		<5 % UT (>95 % caida en		

Prueba de inmunidad Entorno electromagnético – guía Equipos de comunicación RF portátiles y nóviles no deben usarse más cerca de ningurte del dispositivo, incluidos cables, que la de acuerdo con la frecuencia del transmisor Distancia de separación recomendada RF radiada 10 V/m  $d = \left| \frac{7}{E_*} \right| \sqrt{P}$  800MHz a 2.7GHz donde P es la potencia máxima de salida del insmisor en vatios (W), de acuerdo con el abricante, y d es la distancia de separación comendada en metros (m). Campo de prueba de transmisores fijos la intensidad debe ser menor que el nivel de nplimiento en cada rango de frecuencia Puede haber interferencia cerca de equipos arcados con el siguiente símbolo

as bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 0,15 MHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz, 13,553 Iz a 13,567 MHz, 26,957 MHz a 27,283 MHz, y 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radioaficionados entre 8 MHz y 80 MHz son 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz a 1,2 MHz, 10,1 MHz, 10,

a incorporado un factor adicional de 10/3 en las fórmulas utilizadas para calcular la distancia de sepa

nético del sitio. Si la intensidad de campo medida en la ubicación donde s utiliza el dispositivo excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anteriormente, se debe observar el dispos para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser int

movnes y este dispositivo								
ivo está destinado a usarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiad robadas. El cliente o el usuario del dispositivo puede ayudar a evitar interferencias electromagnéticas do una distancia mínima entre los equipos de comunicación RF portátiles y móviles (transmisores) y o, como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del transmisor.								
del MHz	Potencia máxima de salida nominal W	Distancia	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético – s			
	1.8	0.3	27	27	Los equipos de comunicaci inalámbricas de RF no deb			
	2	0.3	28	28	utilizarse a una distancia infe cualquier parte del dispositiv incluidos los cables, que la			
	0.2	0.3	9	9	distancia de separación recomendada calculada a par la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.  Distancia de separació			

 $E = \frac{6}{d} \sqrt{P}$ 

## 5500 Nota 1: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

930

1845

ADVERTENCIAS s celulares, radios o transceptores, ya que podría generar emisiones inesperadas o encias que afecten su correcto funcionamiento.